



CASE 52

Cirurgiões: Marcelo **FAVERI**, Felipe **ARAUJO**, Henrique **BURIOLA**, Jonathan **MEZA**

Diagnóstico:

Paciente: N.G.R. 45 anos, sexo feminino

Paciente procurou a clinica com indicação de regeneração óssea na região anterior da maxila. Feito a regeneração óssea utilizando técnica Tenda [Bonefill Mix com Tela de titânio sobre parafusos tenda]. Após 7 mese foi realizado a instação dos implantes BioMORSE SWE [4]



Visão frontal do aspecto clínico do defeito [Inicial]

Frontal view of the clinical aspect of the defect [Baseline]



Visão do defeito horizontal

Horizontal defect view





Abertura do retalho total

Full thickness flap



Defeito ósseo

Bone defect

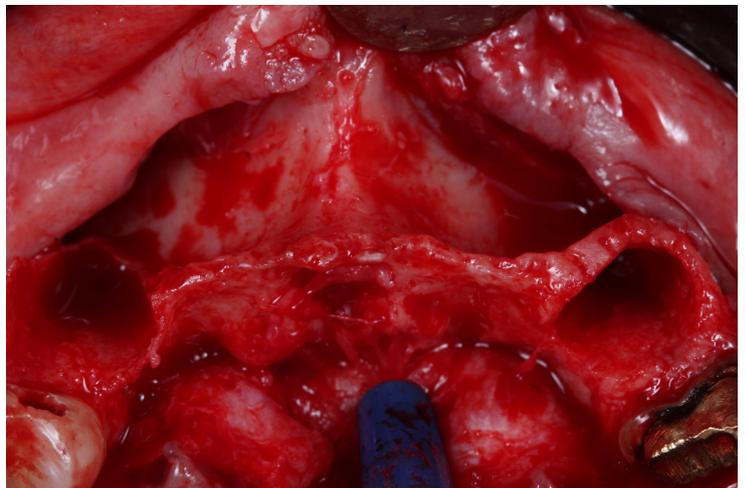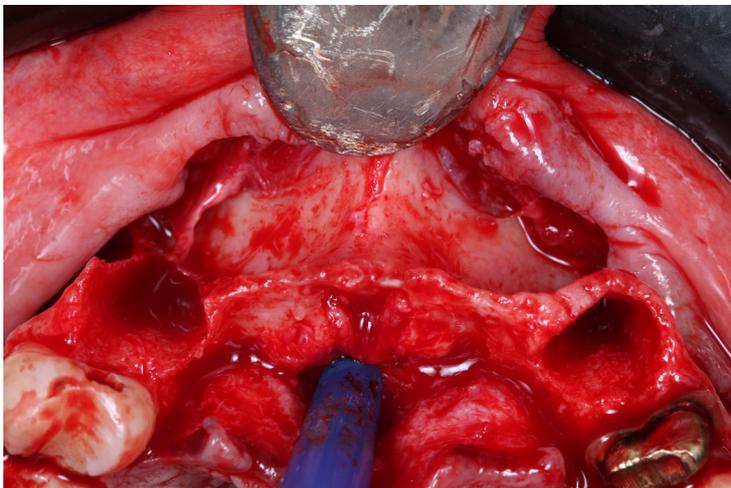

Defeito ósseo vertical e horizontal

Vertical and horizontal bone defect



Fixação dos parafusos tenda DM [Cod 7446 Lote]

DM Tent screw fixation



Fixação das malhas de titânio [Cod 16565 Lote 061303]

Titanium mesh fixation



Enxerto ósseo Bonefill Mix [Cod 16964 Lote 063686]

Bonefill Mix bone graft



Fechamento e Sutura

Final suturing and closing




Sutura Nylon 5.0

Suture Nylon 5.0




Follow Up 7 meses

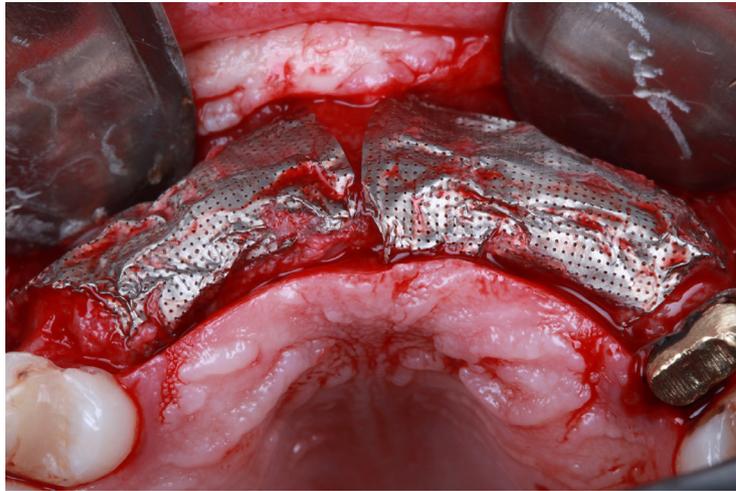


Pós Operatório de 7 meses

Post Surgical 7 months

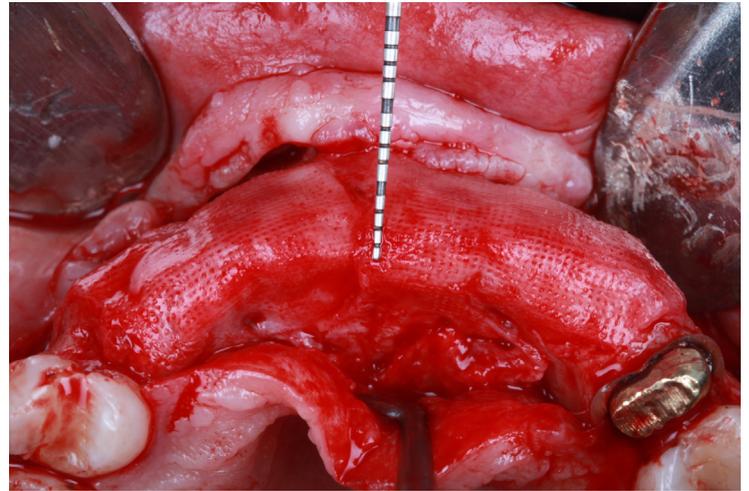

Reabertura do leito cirúrgico

Reopening of surgical site

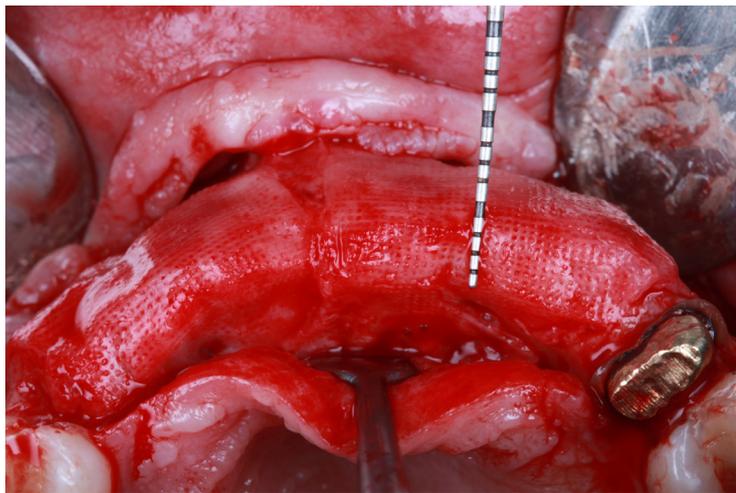


Visão clínica da Regeneração Óssea Guiada [7 mm]

Clinical view of the Guided Bone Regeneration [7 mm]




Visão clínica [ROG 7 mm]

Clinical view [ROG 7 mm]

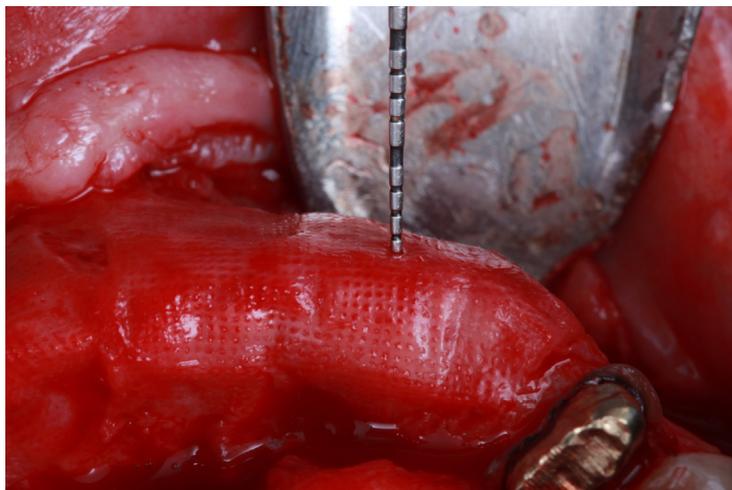

Densidade óssea

Bone density

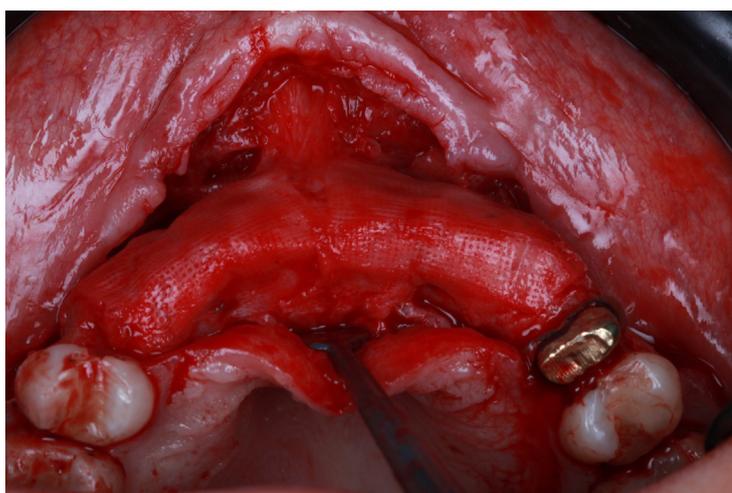


Visão clínica [ROG 7 mm]

Clinical view [GBR 7 mm]




BioMORSE SWE 4,0 x 11,5 mm


SWE Biomorse Implant

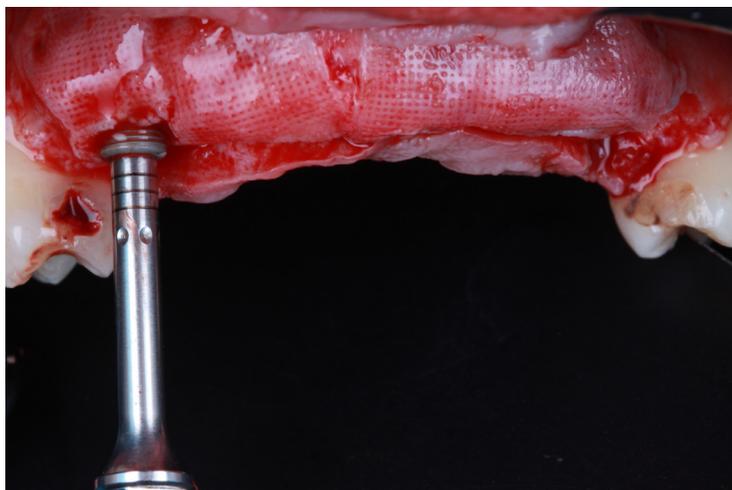

Instalação dos implantes BioMORSE SWE

SWE Biomorse 4,0 x 11,5 mm

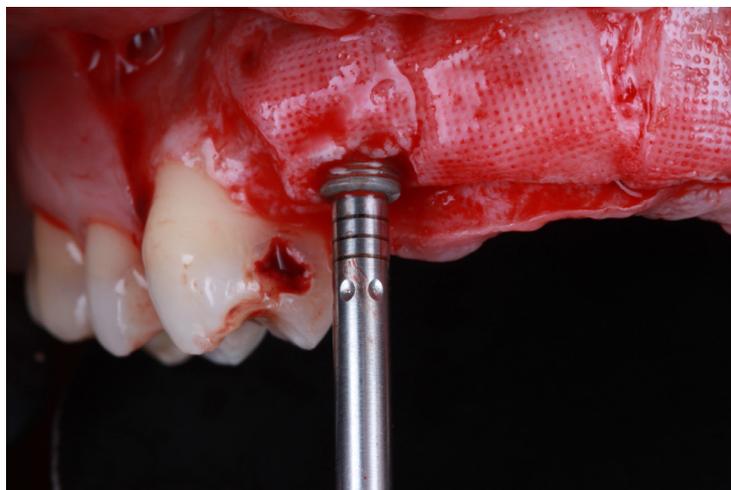

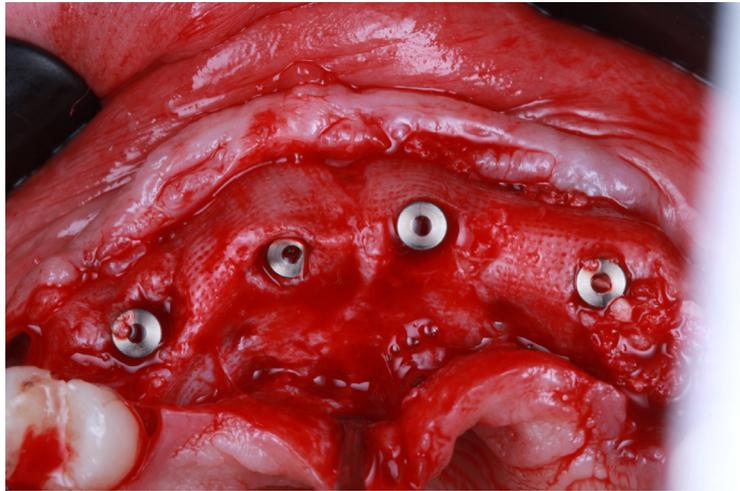

4 x Biomorse SWE 4,0 x 11,5 mm [Cod 11027 Lote 064145]

4 x SWE Biomorse 4,0 x 11,5 mm



Implantes instalados com 30 Ncm de torque

Implants placement with Torque 30 Ncm



Fechamento e Sutura

Final suturing and closing